

# Learn to Walk

## LEARN TO WALK

### Gånghjälpmidlet som förbättrar balans

Learn to Walk är ett gånghjälpmiddel för dig som vill få stöd för gången och samtidigt få möjlighet att lära dig utveckla balansreaktioner och förbättra din balans.

Learn to Walk finns i storlekar för barn från 1 år till ca 12 år. Learn to Walk bidrar till en god hållning och belastning på fötterna. Barnet är fastspänt i ett höftbälte som i sin tur fäster i en rörlig mittbalk. I Learn to walk rör sig barnet åt sidan, framåt-bakåt och uppåt-nedåt genom att mittbalken rör sig i dessa riktningar. Mittbalken kan röra sig när Learn to Walks ram är låst och står stilla. Man kan då träna balans i stående. Genom att reglera inställningar på hjulen kan man öka svårighetsgraden i balansutmaningen. Men öppnar succesivt spärrar för att lära sig balans framåt, åt sidan och bakåt. I Learn to Walk kan barnet ramla kontrollerat utan att göra sig illa. Man kan ställa in lagom fallhöjd genom att ändra på reglage i sidostolparna. Precis som barn ramlar när de lär sig gå kan man i Learn to Walk tappa balans och sedan återta den. Genom att få träna detta ökar man hastigheten i balansreaktionerna och förbättrar sin balans. Om man är helt stabil utan möjlighet att få balansuppgifter att lösa så kommer man inte att förbättra hastigheten i balansreaktionerna.

Till din Learn to Walk behövs ett höftbälte, eventuellt en grenkil och vid behov kan man beställa extra sidofjädrar. Verktyg för att ställa in stopp i sidostolparna medföljer leverans av Learn to Walk. Learn to Walk är hopfällbar för transport.



### Ingår

Learn to Walk kommer delvis monterad och din leverans bör innehålla följande som standard:

- Learn to Walk ram med 2 ställbara hjul
- Höftbälte i önskad storlek

### Extra tillbehör

- Grensele till höftbälte
- Extra sidofjädrar

### Förkunskapskrav

För att säkert kunna använda Learn to Walk är det bra om brukaren kan:



1. Ta sig fram krypandes eller hoppskuttandes på golvet.



2. Sitta med balans framåt och åt sidorna.



3. Ställa sig upp med stöd av hjälpmedel eller möbel.




4. Gå med rollator eller annat gånghjälpmiddel.

## Produktens funktioner

Learn to Walk används framför allt inomhus men kan användas på plana underlag utomhus.

Den rörliga mittkonstruktionen avlastas steglöst av två balansvikter. Balansvikterna gör att personen kan resa sig upp genom att kontrollera sin kroppsvikt men utan att behöva övervinna andra yttre motstånd.

Rörelser höger-vänster tillåts och dämpas av sidofjädrar.

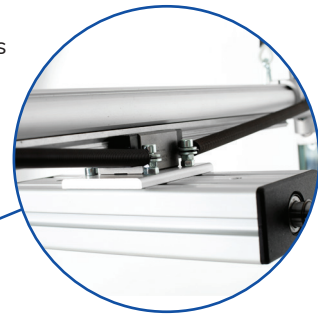

Rörelser framåt/bakåt via stång som rör sig i hållare



Rörelser uppåt/neråt tillåts och dess storlek regleras via spärrar i sidopelare.

Höftbälte med stabila områden och stretchkomponent som tillåter visst "svaj" av överkroppen. Fäster via kuller och tillåter rotationsrörelser av bäckenet. Kan kombineras med grensele.

Möjligt att reglera så att Learn to Walk står helt stilla, eller enbart röra sig framåt eller framåt/bakåt samt möjligt att reglera så att anordningen kan röra sig i alla riktningar.



Länkhjul med släpbroms, backspärr, parkeringsbroms och riktningsspärr.

## Storlekar och mått

	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
Ålder (ungefärlig)	1-2 år	2-5 år	6-12 år
Användares höfthöjd (till golv)	35-50 cm	50-62 cm	62-80 cm
Ram bredd	693 mm	693 mm	770 mm
Ram längd	615 mm	615 mm	715 mm

Brukaren bär sin egen vikt i samtliga modeller.

# Learning by doing