

Learn to walk

Användarmanual

LÄR DIG BALANS UNDER GÅNG



Din Learn to Walk Balanstränare

Välkommen till att använda den nya produkten Learn to Walk, från Learn to Move, en leverantör av innovativa hjälpmedel för barn och ungdomar med funktionsutmaningar. Var vänlig läs denna användarmanual innan du börjar använda Learn to Walk, för att säkerställa att den används på ett säkert sätt. Spara den för att kunna återkomma till den senare.

Learn to Walk är ett gånghjälpmedel som hjälper brukare, som inte kan stå eller gå utan stöd, att systematiskt träna balansreaktioner för att lära sig gå självständigt. När brukaren placeras i produkten, är de fästa i ett höftbälte som sitter fast i en mittbalk som i sin tur fäster i sidostolpar fästsatta i en hjulförsedd ram. Mittbalken kan röra sig i olika riktningar; uppåt, neråt, framåt, bakåt och sidledes. Den hjulförsedda ramen kan vara stilla eller röra sig framåt, åt sidan eller i alla riktningar. Brukaren kan träna balansreaktioner i sin miljö och får förutsättningar att träna andra grundförutsättningar för gående. Learn to Walk ger förutsättning för att träna mycket, att ibland ramlar kontrollerat och få möjlighet att steg för steg träna upp hastigheten i balansreaktioner i olika riktningar. Manualen visar dig hur du kan använda alla Learn to Walks funktioner för att succesivt öka balansutmaningen när brukaren vunnit ny funktion med mål att lära sig självständig gång.

Instruktionerna om säkerhet och underhåll av Learn to Walk kommer att säkerställa att den används säkert för brukarens bästa.

Learn to Walk kommer delvis monterad och din leverans bör innehålla följande som standard:

- Learn to Walk ram med 2 ställbara hjul (1)
- Höftbälte i önskad storlek (2)

Medföljande:

- En insexnyckel

Extra tillbehör*:

- Grensele till höftbälte (3)
- Extra sidofjädrar (4)

*Om du har beställt någon av de valfria tillbehören, kommer dessa också att ingå i leverans.



2. Höftbälte i önskad storlek

1. Learn to Walk ram med 2 ställbara hjul



3. Grensele till höftbälte



4. Extra sidofjädrar

Innehåll

01 Avsedd användning	5
02 Medicinteknisk produkt	6
03 Varningar och försiktighetsåtgärder	6
04 Säkerhet	8
05 Försiktighetsåtgärder och kontraindikationer	10
06 Huvudram – Uppsättning och funktioner	11
07 Höftbälte – Fastsättning och funktioner	18
08 Typisk uppställningsordning	20
09 Rengörings- och skötselinformation	20
10 Daglig produktinspektion	21
11 Årlig produktinspektion	21
12 Återanvändning av Learn to Move-produkter	22
13 Produktservice	23
14 Teknisk information	23
15 Produkt- och tillbehörskoder	24



Var vänlig läs hela användarmanualen innan användning av Learn to Walk.

Hänvisa till användarmanualen innan ni gör några justeringar till enheten.

Underlåtenhet att följa dessa användarinstruktioner kan utsätta användaren för risk.

Observera att dessa instruktioner har skrivits i enlighet med de olika produktkomponenterna – huvudramens uppsättning/funktioner, höftbältets uppsättning/funktioner. De har inte skrivits i en specifik uppsättnings-/justeringsordning eftersom denna kommer att bero på den individuella användaren. Läs dessa instruktioner för att bekanta dig med produktfunktionerna och hänvisa sedan till avsnitt 11 för en guide till en typisk installationsorder.

01 Avsedd användning

Learn to Walk är ett gånghjälpmedel som hjälper brukare som inte kan stå eller gå utan stöd, att gå med stöd och systematiskt träna balans-reaktioner för att lära sig gå självständigt. Learn to Walk används i knästående, halvknästående, stående och gående och tillåter kontrollerade säkra fall i succesivt fler riktningar med ökad svårighetsgrad.

1.1 Indikationer för användning

Learn to Walk storlek 1-ram är lämplig för användare mellan 1 och 2 år, storlek 2 för användare 2–5 år, storlek 3 för användare 6-12 år.

1.2 Learn to Walk är lämplig för:

- Brukare som använder ett stödjande gånghjälpmedel
- Brukare med Cerebral Pares tillhörande GMFCS-nivå III
- Brukare som behöver extra stöd och hjälp att lära sig att gå som inte klassificeras med GMFCS.
- Brukare som drabbats av skada/sjukdom senare under barndomen och tappat gångförmåga.
- Brukare med Cerebral Pares eller annan neuromuskulär påverkan med en motorisk funktionsnivå som innebär att de kan:
 - ta sig fram krypandes eller hoppskuttandes på golvet
 - ha relativt god sittförmåga, dvs. ha balans framåt och kunna ta sak på sidan om kroppen men behöver inte ha full balans bakåt
 - ställa sig upp med stöd av hjälpmedel eller möbel
 - gå med rollator eller annat gånghjälpmedel

02 Medicinsk produkt

Learn to Walk är klassificerad som en klass 1 medicinteknisk produkt under EU föreskrifter. Learn to Walk överensstämmer med EU förordning om medicintekniska produkter (2017/745), dess krav och testmetoder. Som sådan bör Learn to Walk vara föreskriven, upprättad eller återutgiven av en tekniskt kompetent person som har utbildats i användning av denna produkt. Learn to Move rekommenderar att ett skriftligt register förs för att ge detaljer av alla uppsättningar, återutgivningsinspektioner och årliga inspektioner av denna produkt.

Meddelande till användaren och/eller patient: Alla allvarliga incidenter som har inträffat i förhållande till enheten ska rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller brukaren är etablerade.

NOTERA! Allmänna användarråd.

Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till fysisk skada, skada på produkten eller skada på miljön!

03 Varningar och försiktighetsåtgärder

3.1 Varning för vältningsrisk

- Använd aldrig produkten på en sluttande yta större än 5 grader eller på ojämn terräng.
- Undvik användning nära trapp eller annan fysisk fara.
- Lås alltid hjulen innan du placerar brukaren i produkten.
- Se till att mittbalkens position är inställd i nivå med höftbältets placering på kroppen för att få optimal position.
- Ställ in lämplig fallhöjd för det individuella barnet genom att flytta/placera sidospärrar på sidopelarna.

3.2 Varning för användares säkerhet

- Fastsättning och urtagning av användare i produkten måste vara gjord med lämplig utrustning och personal. Lämna tillräckligt med utrymme för brukarens och vårdares rörelser under överföring.

- Se till att höftbältet är säkert fastsatt och kardborren har gott fäste med hela överdelens fästyta mot underdelens fästyta.
- Om brukaren uppvisar någon form av obehag, ta bort hen från produkten så snabbt som säkert möjligt.
- Brukare ska inte lämnas obevakad överhuvudtaget vid användning av Learn to Walk.

3.3 Varning för fingerskada

- Se till att brukaren eller vårdare inte rör någon led som är låst.
- Medan brukaren är fastsatt i produkten, bör vårdaren sträva efter att behålla produkt-justeringar till ett minimum
- Var försiktig vid uppfällning från transportläge till upprätt läge av Learn to Walk så dina fingrar inte får ont vid fastsättning av komponenter och åtdragnings- fästen.
- Under produktmontering och anpassning, bör vårdaren undvika fingerklämning där det finns risk vid produktens leder eller rotationsmoment som inställning av mittbalkens position.

3.4 Varning | Dagliga kontroller

Learn to Walk ska kontrolleras dagligen före användning för att säkerställa att höftbälte, stödenhet, ram och tillbehörs-komponenter är säkra att använda.

3.5 Varning | Rengöring

Rengör Learn to Walk regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts. Ansamlad smuts kan leda till slitage i förtid av tygkomponenterna och uppmuntra korrosion på Learn to Walk. Använd endast icke-slipande hushållsrengöringsmedel och fuktiga trasor, Använd inte rinnande vatten på klädseln till Learn to walk. Se avsnitt 13 i användarmanualen.

3.6 Varning | Rengöring

Slangar och el brickor ska inte användas för att rengöra produkten.

3.6 Varning | Förfogande

Vid kassering av produkten ta hjälp av en samhällsavfallshanteringsplats, ramen bör kasseras separat.

04 Säkerhet

Läs alltid användarmanualen fullständigt innan användning.

- Brukare ska inte lämnas oövervakad någon gång under användning av Learn to Move utrustning.
- Använd endast de av Learn to Move godkända komponenter med din produkt. Ändra aldrig produkten på något sätt. Försummelse att följa instruktioner kan utsätta brukaren eller vårdaren för risk.
- Om du är osäker på fortsatt säker användning av din produkt eller om några delar skulle fungera dåligt, var snäll och sluta använda produkten och kontakta din lokala återförsäljare så snart som möjligt.
- Genomför alla relevanta lägesjusteringar och se till att de är säkert gjorda innan du placerar brukaren i produkten.
- Lämna aldrig produkten på en sluttande yta, mer än 5 grader. Kom alltid ihåg att låsa hjulen. Håll bara fast i ramen för att styra och flytta produkten från ett område till ett annat. Använd aldrig ovanandelens stödenhet eller något tillbehör för detta ändamål.
- Rengör produkten regelbundet. Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Utför underhållskontroller regelbundet för att se till att din produkt är i bra arbetskick.
- Kontrollera att alla vikt bärande komponenter är väl fungerande och säkra innan den tas i bruk.
- Se till att ge brukaren adekvat stöd vid förflyttningar i och ur höftbältet och produkten.
- Underlåtenhet att följa användarinstruktioner kan sätta brukaren i riskzonen.
- Produkten ska förvaras noggrant och inte användas om några delar är defekta.
- Kommunicera med brukaren angående någon positionell justering som ska utföras medan brukaren stöds i enheten.

Learn to Move rekommenderar att ett skriftligt register förs över alla de som har utbildats i korrekt användning av denna produkt. Produkten är konstruerad för inom- och utomhusbruk på släta, plana ytor. Produkten är inte lämplig för användning på ojämn eller grov terräng. När den inte används, ska produkten förvaras på en torr plats dvs inte utsätts för extrema temperaturer. Säker driftstemperatur av produkten är +5° till +40° Celsius.

4.1 Viktigt

För att använda Learn to Walk på ett säkert sätt ska brukaren ha uppnått följande motoriska milstolpar:



Ta sig fram krypandes eller hoppskuttandes på golvet.



Kunna sitta med balans framåt och åt sidorna.



Kunna ställa sig upp med stöd av hjälpmedel eller möbel.



Gå med rollator eller annat gånghjälpmedel.

05 Försiktighetsåtgärder och kontraindikationer

Det är viktigt att rådgöra med brukarens ansvariga terapeut/läkare för att fastställa om Learn to Walk kommer att gynna brukaren. Learn to Walk kanske inte är lämplig för personer med följande presentationer:

- Personer med svåra missbildningar och/eller felställningar av nedre extremiteter med minskad förmåga att belasta fötterna och ha tillräckligt rörelseomfång för att kunna lära sig att ta steg.
- Brukare med betydande inlärningssvårigheter eller beteendeproblem som innebär risk för skada på brukaren och/eller vårdaren/vårdnadshavaren.

5.1 Kontraindikationer

Learn to Walk ska inte användas med brukare med kliniska presentationer enligt nedan:

- Personer med betydande benlängdsskillnad som utesluter ömsesidig kontakt med golvet vid gång.
- Personer med en historia av frekventa frakturer (till exempel benskörhet).
- Personer som upplever obehag som förknippas med positionering i eller ur enheten där detta inte kan lösas med justering av stöd/positionering.
- Brukare som har våldsamma ryckningar eller rörelseutslag.
- Brukare som saknar förmåga att krypa eller hoppskutta fram på golvet.
- Brukare som saknar relativt god sittförmåga, dvs. ha balans framåt och kunna ta sak på sidan om kroppen.
- Brukare som inte kan ställa sig upp med stöd av hjälpmedel eller möbel.
- Brukare som inte kan gå med rollator eller annat gånghjälpmedel.

06 Huvudram – Uppsättning och funktioner

6.1 Ram | Uppvikning av ramens sidopelare



Lyft ut ramen ur lådan och ställ den på en plan, stabil yta, håll den i samma position som den var förpackad i lådan dvs enligt bilden nedan. Se till att hjulen är helt låsta.



Stå vid ramens "U" form, stabilisera ramen med ena handen och lyft mittpartiet till upprätt läge.



Varning! När du lyfter ramen, följ normer för normala förflyttnings och hanterings förfaranden



Observera! Se till att sidostolparna är vertikala genom att föra dem upp så att de tar emot stoppinne.



6.2 Stabilisering i upprätt läge



Ta fram medföljande: 2 stag och 4 klämfästen för att stabilisera sidostolparna. Öppna upp klämfästena något genom att vrida på handtaget. Klämmorna placeras i varsin ände av stagen och fästes sedan på ram och sidostolpar, enligt bild för att stabilisera sidostolparna i upprätt position. Obs! Dra åt handtagen för att säkerställa att stagen är stabila.



Dessa stag tas endast bort vid transport då det finns behov av fälla ihop och göra Learn to Walk mindre.

6.3 Ställ in höjden på mittbalken




Mittbalkens grundinställningshöjd ska motsvara brukarens höfthöjd. Du ställer in höjden med hjälp av de 2 hjultrissor som finns på ramen vid sidostolparnas fäste. Genom att snurra trissan i pilens +/plus riktning så höjs mittbalkens läge. Genom att snurra trissan i pilens riktning -/minus, så sänks mittbalkens läge. Obs! För att snurra trissan åt minus symbolens håll behöver den först dras ut och sedan rotera.

När höjden är rätt inställd behöver den endast ändras om en betydlig längdtillväxt av brukaren sker. Brukaren ska kunna ha visst rörelseutrymme uppåt om höftbältet åker upp i midjan.



Varning! Vidta försiktighetsåtgärder för att undvika klämskador av fingrar i samband med trissan vrids.

6.4 Ställ in stopp för fall

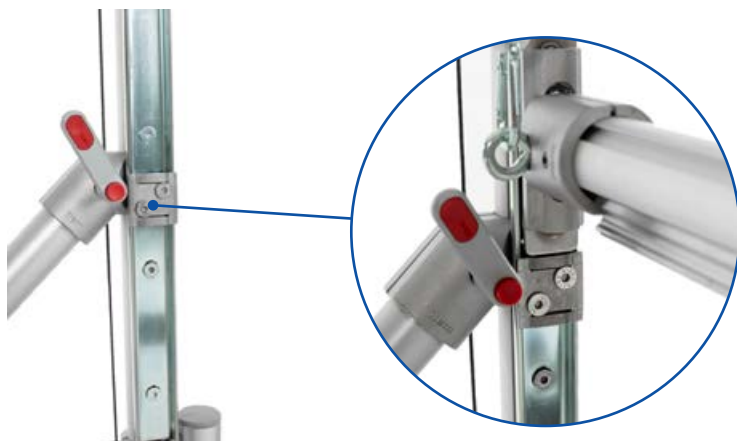

På insidan av sidopelarna finns skåror som tillåter mittbalken att röra sig uppåt och neråt. Man kan där begränsa mittbalkens rörelse neråt genom att ställa in stopp på lämplig nivå. Grundinställningen är att brukaren ska kunna stå på knä och inta sittande position och att mittbalken därför ska kunna röra sig något lägre än den höjd som motsvarar höftens position i knästående och sittande. Använd bifogad insexnyckel vid ändring av stoppen.

6.5 Inspektion av sidofjädrar



Sidofjädrarna tillåter rörelser i sidled samtidigt som de ger en viss dämpning av rörelsen. Om fjädrarna blir utnötta och slappa så att de hänger ner bör de bytas ut.


6.6 Hjul

Learn to Walk har 4 hjul varav bakhjulen är fasta och framhjulen har inställningar som gör att de går att bromsa, styra riktningar, göra trögare att röra sig bakåt samt öka eller minska motstånd.

6.7 Sätta på/släppa bromsar

För att bromsa, placera foten på bromspedalen. Trampa på bromspedalen en gång tills ett klick hörs: **A**, då tryck en gång till: **B**.

Lossa bromsarna med foten så att bromspedalen vänder tillbaka till originalet, standardläge: **C**.

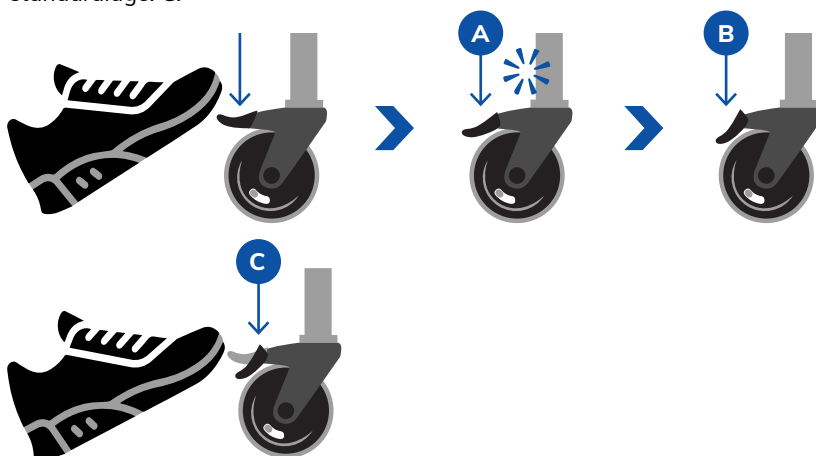


Varning! De 2 länkhjulen bör ha bromsats när användare förflyttas i och ut ur produkten. Detta gäller även när eventuella justeringar görs på hjulen och användaren är i produkten – detta säkerställer att ramen/användaren inte rör sig oväntat.

6.8 Riktningsslåsfunktion

För att tillämpa riktningsslås, sätt foten på bromsen och trampa ner. Tryck på bromsens pedal en gång tills ett klick hörs: **A**. Roter sedan hjulet runt genom att flytta ramen tills du hör ett klick till hjulet är nu låst i läge **B**. Hjulen begränsar ramen till att mest röra sig i en framåtriktning.

För att frigöra riktningsslåset, tryck på ovansidan av bromspedalen med foten så att pedalen fälls tillbaka till sitt original, standard-läge.

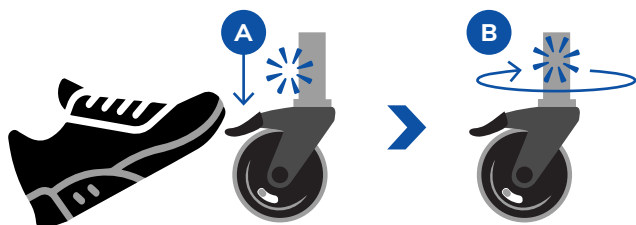


Varning! Aktivera/slåpp bromsarna med foten, använd inte fingrar.

6.9 Anti-rolla bakåt funktion


Säkerställ att riktningsslås funktionen har tillämpats på båda hjulen – se avsnitt 6.8 “Riktningsslås funktion” för detaljer.

- För att applicera anti-rolla bakåt funktionen, tryck på vredet så långt det går **A** i riktning där det finns endast en pil-ikon. Anti-rolla bakåt funktionen bör appliceras på båda hjulen – det kommer bara att fungera på de hjul som det har applicerats på.
- För att frigöra anti-rolla bakåt, tryck så långt det går på vredet mot pil-ikonen med två riktningar **B**. OBS! Ett klickande ljud kan höras när ramen är i rörelse efter anti-rolla bakåt funktionen har tillämpats. Detta är normalt och är inte en anledning till oro.

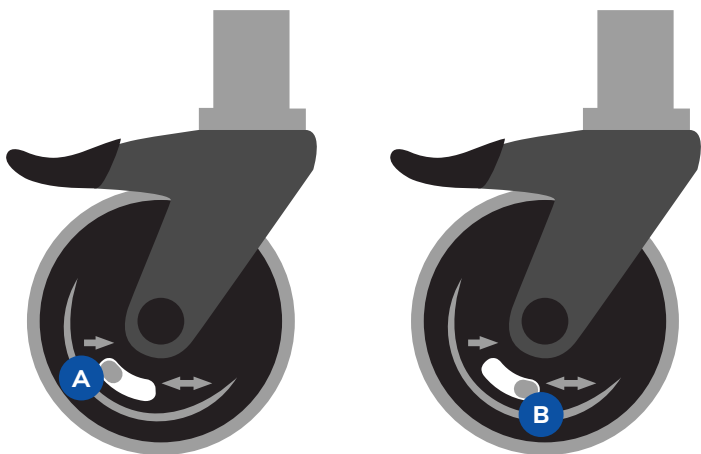

6.10 Motståndsfunktion

- För att applicera motstånd mot hjulen tryck vredet mot "+" ikonen - ju längre ratten rör sig mot "+" ikon, desto större motstånd. **(A)**
- För att ta bort motstånd mot hjulen tryck vredet mot "-" ikonen - ju längre ratten rör sig mot "-" ikon, desto mindre motstånd. **(B)**
- Motstånd bör appliceras lika för båda hjulen.
- Använd motståndsfunktionen om du märker att användaren rör sig för snabbt i Learn to Walk.

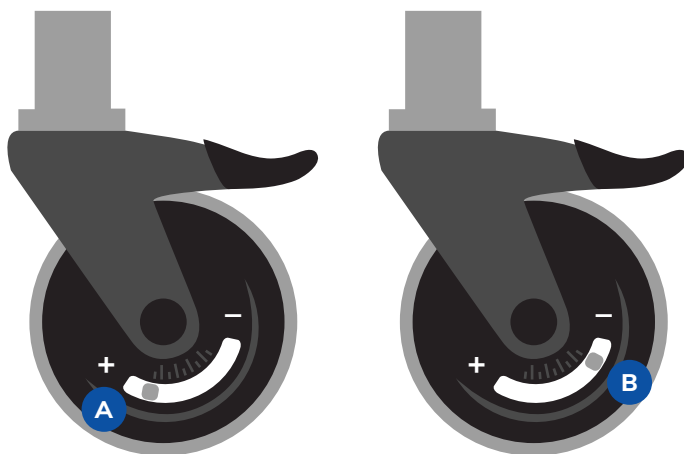


07 Höftbälte – Fastsättning och funktioner

7.1 Fastsättning av höftbälte

Höftbältet ska skruvas fast i mittpartiets horisontella stång. Den skruvas fast i stången som pekar i riktning framåt, där golvramen är öppen.

- Lossa på mutter och skruv som håller fjäder fast vid den horisontella stången.
- Skruva fast höftbältet så långt det går i hållaren.
- Höftbältet är då fäst. Spara skruv och mutter för att hålla fjäder på plats om du tar av höftbältet.

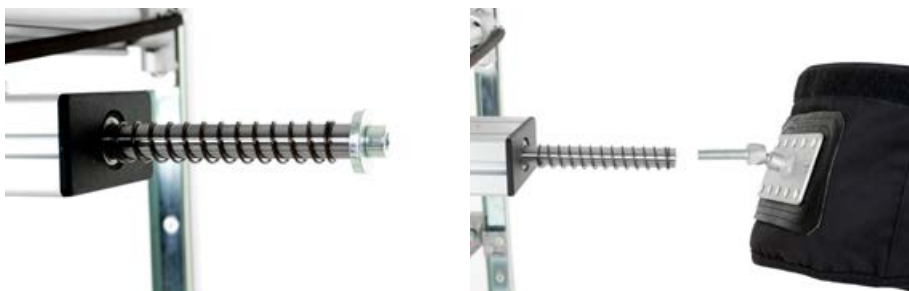

7.2 Förbered användning av höftbälte

Höftbältet består av 3 stabila ytor och 2 elastiska ytor. De stabila ytorna utgör kardborrefäste för fastsättning av höftbältet runt brukarens höft i varsin ände av höftbältet. Den tredje stabila ytan är i mitten av höftbältet där kulle är fastsatt på ryggsidan av höftbältet och skruvas fast i Learn to Walk.



I ändarna är kardborre fäste och fästyta förankrade. Fästet mäter 5 centimeter i bredd och fästytan är 10 centimeter bred. OBS! Hela fastsatta fästet ska rymmas på fästytan. Om det inte gör det behövs en större storlek på höftbältet.

Grenselen är ett tillval och används om brukaren har behov av att ytterligare stabilisera höftbältet. Fäste gör grensele fram är fastsatt i nedre delen av den del av höftbältet som hamnar fram på kroppen. Under metallplatta och skruv är fäste gör grensele bak.



7.3 Ta på höftbältet

Välj passande storlek för brukaren och ta på höftbältet. Överlappa selen för att säkra den runt användarens midja med ett minimum av 5 cm, vilket säkerställer överlappande kanter är raka. Vid behov kan grensele användas för att förhindra att höftbältet glider upp på bålen. Grenselen fästs med kardborre bak och fram på höftbältet.



Varning! När användaren förflyttas till/från enheten, bör normala flytt- och hanteringsrutiner följas. Hjulen ska vara helt låsta. Vårdare och ett stabilt stöd för brukaren att hålla i sig krävs för förflyttningar.

08 Typisk uppställningsordning

Ställ in mittbalkens höjd så att den är några centimeter under höftkammens höjd. Se avsnitt 6.3 "Ställ in höjden på mittbalken" för fullständiga instruktioner.

Ställ in stopphöjden för mittbalken så att den är i några centimeter lägre än brukarens höft i knästående position. Det är möjligt att ställa fallhöjd efter önskemål. Rådfråga fysioterapeut för att erhålla förslag för lämplig inställning.

Välj storlek på höftbältet som passar brukarens mått. Fäst höftbältet enligt instruktioner i 7.3 "Fastsättning av höftbälte".

Lås hjulen och börja med att placera barnet i Learn to walk när den står stilla och barnet rör sig via mittbalken.

För progress av träning se till att få adekvat stöd från personal som förskrivit Learn to Walk.

09 Rengörings- och skötselinformation

Höftbältet tvättas för hand. Se till att vika ihop höftbältet inåt, så att kardborren är framdel är fäst i kardborrefästets bakdel. Fläckar bör tas bort så snabbt som möjligt.

De flesta fläckar på höftbältet kan avlägsnas och rengöras med en mikrofiberduk och ljummet vatten. Denna metod för rengöring är effektivare än en standardduk, vatten och egen tvål.

Grenselen kan tvättas i skonsam cykel 40 grader. Fäst kardborredelarna mot varandra på samma sätt som när grenkilen används. Blötlägg inte grenselen i förväg och använd endast små mängder rengöringsmedel.

Att hänga upp på tork är rekommenderat.

Se alltid till att höftbälte och grensele är torra innan användning.

Metall komponenter: Tvål och vatten eller antibakteriell spray kan användas vid rengöring. Använd inte lösningsmedel för att rengöra metallkomponenter. Kontrollera att produkten är torr före användning.



Varning! Om du är osäker till fortsatt säker användning av Learn to walk eller om någon produkt-del inte fungerar var vänlig och sluta använda produkten och kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.

10 Daglig produktinspektion

10.1 Terapeuter, föräldrar och vårdare

Vi rekommenderar att dagliga visuella kontroller av utrustning görs av terapeuter, vårdare eller föräldrar för att säkerställa att produkten är säker att använda.

Rekommenderade dagliga kontroller beskrivs i detalj nedan.

- Kontrollera att höftbältet är säkert fastsatt
- Kontrollera att alla hjul är rör sig fritt och låsfunktioner fungerar säkert.
- Kontrollera att bromsarnas riktningsspärr fungerar korrekt.
- Kontrollera att mittstolparna står raka.
- Kontrollera att det är rätt höjd på mittbalk och dess stopp.
- Kontrollera kardborre på höftbälte och grenkil för tecken på slitage.
- Kontrollera höftbältets kardborreband och borsta bort eventuellt ludd för att säkerställa det säkras ordentligt.
- Kontrollera mitt-balkens rörelseförmåga för tecken på slitage.
- Kontrollera att sidofjädrar har god spänst och inte slackar.



Varning! Om du är osäker på fortsatt säker användning av din Learn to Walk eller om någon produkt-del inte fungerar var vänlig sluta använda produkten och kontakta din lokala återförsäljare så snart som möjligt.

11 Årlig produktinspektion

11.1 Tekniker, Learn to Walk Produkt Specialister, återförsäljare

Learn to Move rekommenderar att varje produkt bör vara föremål för en detaljerad besiktning minst en gång per år och varje gång produkten återutges för användning. Denna inspektion bör utföras av en tekniskt kompetent person som har utbildats i att använda produkten och bör inkludera följande kontroller som ett minimikrav.

- Kontrollera att sidostolparna går att fästas säkert till ramen.

- Kontrollera att sidostolpar går att resa till vertikalt läge och att kontrollstolpar är vertikala.
- Kontrollera varje hjul individuellt. Se till att de är de rör sig fritt och ta bort eventuell smuts från hjulen.
- Kontrollera att bromsarna på hjulen låser dem säkert.
- Kontrollera att riktningsslås, anti-rulla tillbaka och motståndns egenskaper fungerar korrekt.
- Kontrollera att mittbalken rör sig som förväntat och att spärrar för lägsta nivå är ordentligt fastsatta.
- Kontrollera höftbälte och kardborreband för tecken på slitage.
- Kontrollera höftbälte och kardborreband och borsta bort eventuellt ludd för att säkerställa det säkrar ordentligt.
- Kontrollera höftbältets kulled och för tecken på slitage.
- Kontrollera att eventuella tillbehör är säkert fästa.
- Kontrollera om det finns lösa delar/skruvar/beslag och åtgärda vid behov.
- Kontrollera visuellt strukturen av produkten och att det inte finns tecken på fel eller veka kopplingar.
- Kontrollera visuellt plastdelar av produktsäkra att det inte finns tecken på svaghet eller sprickbildning. Learn to Move rekommenderar att en skriftlig rapport upprätthålls av alla årliga produktinspektioner.

12 Återanvändning av Learn to Move-produkter

De flesta Learn to Move produkter är bedömda och beställda för att möta behoven hos en enskild användare. Innan återutgivning av en produkt rekommenderar vi att terapeut som ordinerar produkten har genomfört en utrustningskompatibilitet för att säkerställa att den nya användaren av produkten som återutges inte innehåller ändringar eller speciella tillbehör. En detaljerad teknisk inspektion bör genomföras av produkten innan återutgivning. Denna bör vara utförd av en tekniskt kompetent person som har utbildats i användning och inspektion av produkten.

Se avsnitt 11 "Årlig produktinspektion" för att de nödvändiga kontrollerna genomförs. Innan du återutger en produkt, rekommenderas att den är desinficerad med en av följande procedurer:

OBS! Rengör alltid produkten först för att ta bort ackumulerad smuts innan desinficering/sanering.

1. Där det är möjligt, rekommenderar vi användning av en automatisk "dimma" desinfektionssystem alltså ett system som används för att helt täcka produktens ytor med ett desinfektions-medel. Hänvisning bör tas till tillverkarens instruktioner för det valda systemet innan använd och följas exakt.
2. Då ett automatiserat desinfektionssystem inte är tillgängligt, ska alla produktens ytor torkas av med desinfektions-medel eller vätska med desinfektionsmedel på en mjuk trasa. Lämpliga produkter är 70% IPA, 70% alkohol eller utspätt blekningsmedel. Tillverkarens instruktioner för den utvalda produkten ska följas. Säkerställ att en kopia av användaren manualen medföljer produkten. En kopia kan laddas ner från vår webbplats www.learnmove.se. Learn to Move rekommenderar att ett skriftligt protokoll förs av alla produktinspektioner som genomförs under återutgivning av produkten.



Varning! Om du är osäker på en fortsatt säker användning av din Learn to Move-produkt eller om någon del inte fungerar, vänligen sluta använda produkten och kontakta vårt kundtjänst eller din lokala återförsäljare-distributör så snart som möjligt.

13 Produktservice

Om du som brukare, anhörig eller personal har frågor om produktservice var vänlig kontakta brukarens hjälpmedelscentral.

14 Teknisk information















	Storlek 1 ram	Storlek 2 ram	Storlek 3 ram
Ålder (ungefärlig)	1-2 år	2-5 år	6-12 år
Användares höfthöjd (till golv)	35-50 cm	50-62 cm	62-80 cm
Ram bredd	693 mm	693 mm	770 mm
Ram längd	615 mm	615 mm	715 mm

15 Produkt- och tillbehörskoder

Artikelnummer	Storlek	Max bäcken höjd	Ungefärlig brukarålder	Rambredd
07350155810010	1 Learn to Walk ram	51	1-2 år	693
07350155810027	2 Learn to Walk ram	62	2-5 år	693
07350155810034	3 Learn to Walk ram	80	6-12 år	770

Artikelnummer	Höftbältets storlek	Höftomfång
07350155810003	Special mini	måttbeställd
07350155810058	XXS	50-55 cm
07350155810065	XS höftbälte	55-60 cm
07350155810072	S höftbälte	60-65 cm
07350155810089	M höftbälte	65-70 cm
07350155810096	L höftbälte	70-75 cm
07350155810102	XL höftbälte	75-80 cm
07350155810119	XXL höftbälte	80-85 cm
07350155810126	Special maxi	måttbeställd
07350155810133	Storlek 1 grenkil	35 cm lång
07350155810140	Storlek 2 grenkil	45 cm lång
07350155810157	Special grenkil	måttbeställd

Tabell över symboler

Symbol	Betydelse
	Tillverkare
	Serienummer
	Läs bruksanvisningen
	CE-märkning
	Medicinteknisk produkt
	Varning
	Tillverkningsdatum
	Latexfri
	Unique Device Identification
	Blek inte
	Torktumla inte
	Stryk inte
	Inte kemtvättas
	Handtvättas

**Learn to Move AB**

Sollentunavägen 138
SE-191 48 Sollentuna

+46 73 526 48 88
hello@learntomove.se
www.learntomove.se

**R82 A/S**

Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

+45 796 858 88
R82@etac.com
www.etac.com

Läs instruktionerna. Den senaste versionen av alla bruksanvisningar kan laddas ned som "pdf-fil" från webbsidan. Användarinformationen är inte tillgänglig i punktskrift.

Learn to walk